

# Lydpute for TV-lytting

## med trådløs mottaker



# Brukerhåndbok

---

# Innholdsfortegnelse

---

<b>1. Innledning</b>	<b>3</b>
<b>2. Oversikt</b>	<b>4</b>
Lydputen	4
Mottakeren	4
<b>3. Komme i gang</b>	<b>5</b>
Lydputen i stolen	5
Koble til strømforsyningen	5
Stille inn kanal	5
<b>4. Daglig bruk</b>	<b>6</b>
<b>5. Viktig informasjon</b>	<b>6</b>
<b>6. Resirkulering</b>	<b>6</b>
<b>7. Tekniske data</b>	<b>7</b>
<b>8. Tilbehør</b>	<b>7</b>
<b>9. Feilsøking</b>	<b>8</b>

## 1. Innledning

---

Lydputen er spesielt utviklet for å gi best mulig gjengivelse av TV-lyd i godstolen.

Med Lydputen bak nakken får du nærfeltslyd fra TV med normalt stemmenivå (65dB). Det gir meget god lyd som er lett å oppfatte, og det med et lydnivå som ikke forstyrrer andre personer i rommet.


Samtidig som du hører hva som sies på TV kan du følge med på samtaler i rommet.

Lydputen er designet for å passe de fleste "godstoler" med høy rygg.

Lydputen må brukes sammen med "Sender for TV-Lytting", som bestilles separat. (Varenr. 1562)

## 2. Oversikt

### Lydputen

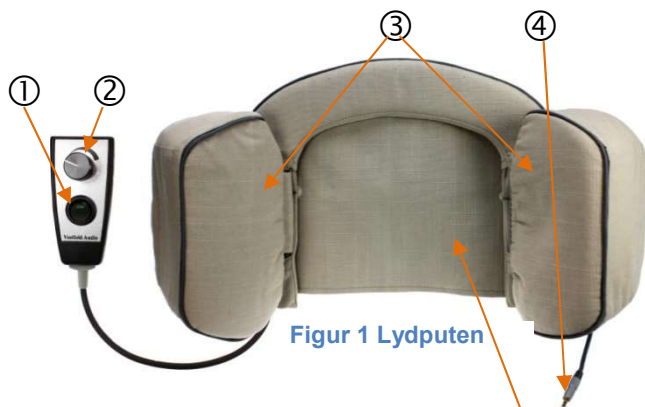

Figur 1 Lydputen



Figur 2 Lydputen over stolrygg



Figur 4 Mottakerens kanalvelger

### Mottakeren



Figur 3 Mottakeren topp

1. Volumkontroll
2. På/Av
3. Høytalere med avtakbart trekk
4. 3,5mm Jack kontakt
5. Avtakbart trekk
6. Strammereim
7. Mottaker-lomme
8. Motvektslodd
9. Tonesetting
10. Indikator for mottak av radiosignal
11. På-indikator
12. Lydsignal ut (stereo jack)
13. Kanalvelger
14. Tilkoblingsledninger

### 3. Komme i gang

---

#### Lydputen i stolen

Lydputen henges over stolryggen med "overhenget" bakover.

Flytt den opp og ned til høyttalerne er på høyde med ørene dine.

Spenn den fast med strammereimen (6).



Høyttalerputene kan vinkles. Prøv deg fram til det som passer deg best.

Fjernkontrollen legges fram til armlenet.

#### Koble til strømforsyningen

Strømforsyningen er fast tilkoblet elektronikkboksen (mottakeren) som ligger i lommen nederst i bærestykket bak.

Sett strømforsyningen i kontakten på veggen.

#### Stille inn kanal

For at du skal motta lyd fra TV-apparatet, må det benyttes en sender som tilkobles lydutgang på TV-apparatet, dekoder eller lydanlegg. Denne bestilles separat:

"Sender for TV-Lytting"

(Varenr. 1562).

Mottakeren i Lydputen må stilles inn til samme kanal som på senderen. Lydputen er fabrikkinnstilt til kanal 1.

Ta ut mottakeren og still til riktig kanal med kanalvelgeren (13).



## 4. Daglig bruk

---

1. Slå på Sender for TV-lytting. (Se egen bruksanvisning.)
2. Slå på TV-apparatet / dekode / lydanlegg.
3. Slå på Lydputen (1).
4. Juster lydvolument (2) til et behagelig nivå.
5. Vinkle høyttalerne for beste komfort.
6. Du kan tilpasse lydbildet med tonekontrollen (9).
7. Vask trekket når det begynner å bli skittent. Lydputens stofftrekk over høyttalerne og bakstykket kan tas av og vaskes:  
Håndvask 30 grader.



### Tips

Du kan vinkle lydputens høyttalere.



### Viktig

Kontroller jevnlig alle ledninger. Hvis du oppdager at isolasjonen har blitt skadet slik at den elektriske lederen vises, må straks trekke ut strømforsyningen og ikke bruke produktet. Kontakt servicepersonell.

## 5. Viktig informasjon

---

- Lydputen skal ikke utsettes for regn / vannsøl.
- Temperatur: 0°C-+40°C
- Lydputen skal ikke benyttes eller lagres der det er kondenserende luft.

## 6. Resirkulering

---

Lydputen skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

## 7. Tekniske data

---

Frekvensområde:	40 – 14000 Hz
Radio båndbredde:	863 – 865 MHz
Bruksområde:	Innendørs
Strømforsyning	230VAC / 15V DC
Vekt:	1150g
Dim (HxBxD):	200x130x90 mm

## 8. Tilbehør

---

For overføring av lyden fra TV-apparatet



### **Sender for TV-lytting**

Art.nr. 863-SENDER

Varenr. 1562

## 9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
<b>Ingen lyd i høyttalere og ikke grønt lys i (1).</b>	Ingen strømtilførsel	Koble til strømforsyningen.
	Strømforsyningen virker ikke.	Kontakt assistanse/service.
<b>Ingen lyd i høyttalere, men grønt lys i (1).</b>	Senderen er tilkoblet feil på TV/dekoder/lydanlegg	Koble til riktig.
	Mottaker står på feil kanal.	Still inn mottaker til riktig kanal (13).
<b>Ikke gult lys i (10)</b>	Senderen er ikke påslått.	Skru på senderen.
<b>Dårlig lyd</b>	Volumet er stilt for høyt	Juster nivået med (2)
	Tone er ikke riktig	Prøv andre tonesettinger med (9)
<b>Høyttalerne vil ikke stå i posisjon</b>	Daglig bruk har løsnet strammingen i hengsel.	Ta av trekket rundt høyttaleren. Skru til mutter på akselen til passe friksjon oppnås. (Krever verktøy.)

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til [post@vestfoldaudio.no](mailto:post@vestfoldaudio.no) eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

[www.vestfoldaudio.no](http://www.vestfoldaudio.no)

tel. 33 47 33 47

